

わずか
1秒!!

パタッと開いてすぐに使える!

パタッと開けばセット完了

スポンジ入りで、
避難所等のマットと
しても使えます

- ・ 軽くて持ち運びに便利
(約 1.7kg)
- ・ 折畳時は座布団サイズ
重ねて収納できます

超軽量簡易担架

パタッと担架



1人での引きずり搬送、
2人以上での
手持ち搬送も OK!!

柔らかいスポンジを
採用し、救助者を
優しく包み込む設計

学校、病院、
自治体、その他
あらゆる施設に
おすすめ
致します!



パタッと担架 取り扱い 及び注意事項

- ・ 使用前に、本体の切れや裂け、紐のほつれ等無いか、必ず確認を行ってください。
- ・ 現場まで持ち運び、三つ折りの担架を開いてください。
- ・ 救助者を担架の中心に寝かせ、数人で紐を持ち、平行に持ち上げて救助者の落下のないよう搬送してください。
- ・ 搬送時は安全のため、なるべく3人以上で搬送してください。
- ・ 重症な方を搬送する場合は、専門家の指示に従ってください。
- ・ 取り扱いには十分注意をし、間違った使い方をしないでください。
- ・ 汚れを落とす時は、中性洗剤を柔らかい布等に付けて落とし、洗剤分をよく拭き取って自然乾燥させてください。
- ・ 保管は、日光や雨風が当たる場所、高温多湿になる所を避けて、屋内の乾燥した場所に保管してください。

販売元

材質	〈本体〉塩ビ ターポリン 0.35mm 〈内側〉スポンジ 20mm
サイズ	〈使用時〉約 600×1850mm 〈折畳時〉約 600×600mm
重量	超軽量 約 1.7kg
強度	最大 100kg 試験合格品
定価	¥15,000 (税別) 収納袋入り

製造元

株式会社 東新商会

意匠登録商品